


TRUMPOJI VARTOTOJO INSTRUKCIJA




„TELTOHEART“ PALEIDIMAS

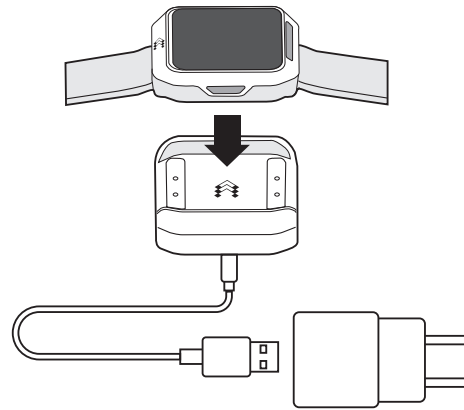

- ĮKRAUKITE
 - Įkiškite laidą į įkrovimo stotelę;
 - Padėkite TeltoHeart ant įkrovimo stotelės;
 - Įkiškite įkrovimo blokelį į elektros šaltinį.

ELEKTROKARDIOGRAMOS GREITASIS ĮRAŠYMAS

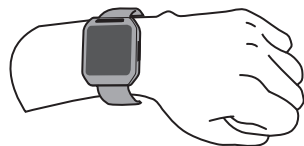


- Atsisėskite ir įsitikinkite, kad „TeltoHeart“ yra ant kairiojo riešo ir tvirtai bei patogiai pritvirtintas.




- „TeltoHeart“ ekranėlį perbraukite pirštu į viršų, kad atidarytumėte greitąjį meniu.


- Ekrane paspauskite „ĮRAŠYTI EKG“ mygtuką.

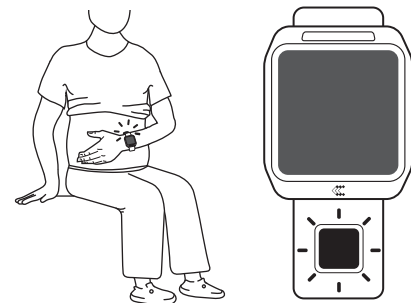


- Pridėkite ant apyrankės esantį pilvo elektrodą prie pilvo kairės pusės apačios.

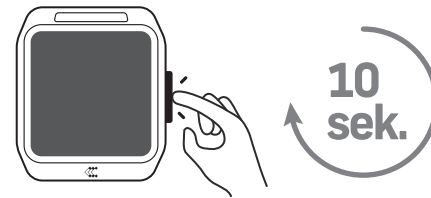

- ĮJUNKITE
Įjunkite „TeltoHeart“ apyrankę, spausdami ir laikydami dešinėje esantį mygtuką 10 sekundžių.

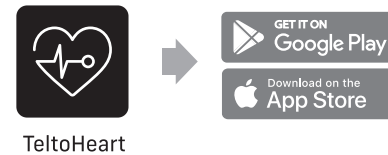


- PARSISIŪSKITE PROGRAMĖLĘ
Apple Store (🍏) arba Google Play Store (📄) platformose paieškos laukelyje įveskite „TeltoHeart“ (📱) ir atsisiųskite programėlę į savo telefoną.

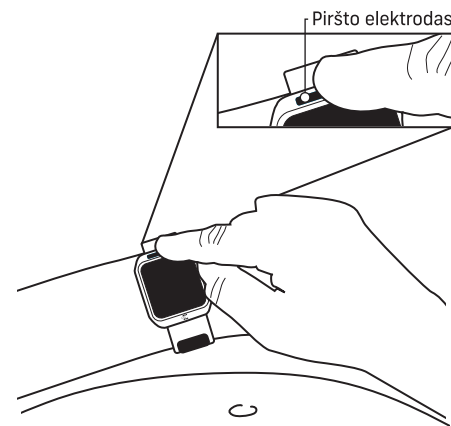


- Laikydami pilvo elektrodą prie kairės pilvo pusės, dešinės rankos pirštu lengvai prilieskite rėmelio elektrodą, kuris yra virš ekrano.
Atsipalaiduokite ir stenkitės nejudėti, kai vyksta prieširdžių virpėjimo ir širdies ritmo įrašymas.


GREITA DUOMENŲ PERŽIŪRA

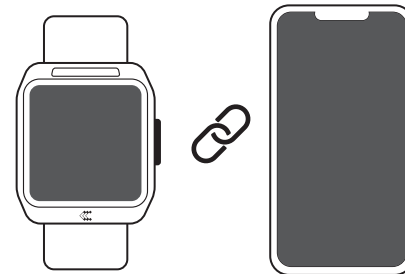


- Įsitikinkite, kad „TeltoHeart“ programėlė yra įjungta, o „TeltoHeart“ apyrankė yra prisijungusi prie mobiliosios programėlės.
Programėlės pagrindiniame lange neturi būti jokių pranešimų, o „Susieti įrenginį“ skiltyje turi būti pranešimas „Prijungta“.

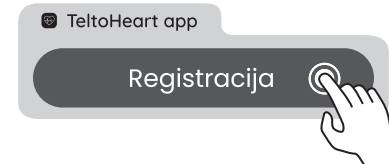

- SUSIKURKITE PASKYRĄ
Atsisųstoje į telefoną mobiliojoje programėlėje arba užėję į teltocare.com paspauskite mygtuką „Registracija“ ir užpildykite registracijos formą. Užsiregistravę į el. paštą gausite laikiną slaptažodį.

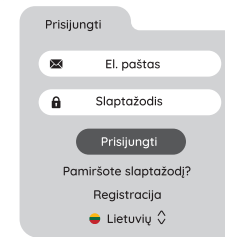

- PRISIJUNKITE
Naudojant prisijungimo ID ir slaptažodį, telefono prisijunkite prie mobiliosios programėlės.

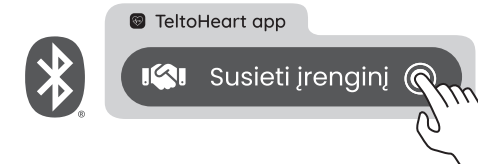

- SUSIEKITE
Įsitikinkite, kad Bluetooth funkcija telefone įjungta. „TeltoHeart“ mobiliojoje programėlėje eikite į „Susieti įrenginį“ skiltį ir paspauskite ant prietaiso pavadinimo, kuris atsiras sąrašė.



- „TeltoHeart“ apyrankės ekrane matysite skaičius, kuriuos reikia suvesti telefono programėlėje iššokusiam lange.

Kilus klausimams kreipkitės:
teltocare@teltonika-telemedic.lt

teltocare.com



- DUOMENŲ PERŽIŪRA
„TeltoHeart“ apyrankės surinktus duomenis galite peržiūrėti internetiniame puslapyje - teltocare.com, naudodami tuos pačius prisijungimo duomenis, kaip ir prisijungiant prie „TeltoHeart“ mobiliosios programėlės.

Elektrokardiograma

- Paspauskite ant „Elektrokardiograma“ sekcijos ir peržiūrėkite savo elektrokardiogramos įrašus.

- DUOMENŲ IŠSIUNTIMAS
Programėlėje spauskite mygtuką „Synchronizuoti“ arba užtikrinkite, kad mobilioji programėlė yra įjungta ir visada susijungusi su „TeltoHeart“ išmaniaja apyranke.
Duomenys į teltocare.com siunčiami iki 15 min.